



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Telefon: +49-[0]7433-9933-0

Faks: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instrukcja obsługi

## Mechaniczna skala do pomiaru wzrostu

**KERN MBA-A01**

Wersja 1.0

2018-08

PL



MBA-A01-BA-pl-1810



# KERN MBA-A01

Wersja 1.0 2018-08

## Instrukcja obsługi

## Mechaniczna skala do pomiaru wzrostu

### 1 Dane techniczne

KERN (typ)	TMBA-A01-A
Model	MBA-A01
Zakres pomiarowy	30–80 cm
Działka elementarna	1 mm
Tolerancja	5 mm
Wymiary (S x W x G) mm	850 x 240 x 60 mm
Ciężar netto	ok. 800 g

### 2 Deklaracja zgodności

Aktualna deklaracja zgodności WE/UE jest dostępna online pod adresem:

[www.kern-sohn.com/ce](http://www.kern-sohn.com/ce)

---

### 3 Przegląd urządzenia

---



1. Skala
2. Zagłówek
3. Suwak pomiarowy/podnózek

---

## 4 Wskazówki podstawowe (informacje ogólne)

---



⇒ Przed ustawieniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, nawet wtedy, gdy mają już Państwo doświadczenie z wagami firmy KERN.



### **Wskazówki bezpieczeństwa**

- Przestrzegać instrukcji obsługi.
- Używać wyłącznie materiałów montażowych dostarczonych wraz ze skalą.
- Przesuwając suwak skali uważać, aby mierzona osoba nie doznała żadnych obrażeń.
- Pomiar wzrostu dostarcza wartości godnych zaufania tylko wtedy, gdy pięty, plecy i głowa są wyprostowane, przy czym należy pamiętać, że w ciągu dnia wzrost osoby może zmienić się o kilka cm.

### **Nadzór nad środkami kontrolnymi**

- Zalecane jest pomiarowe sprawdzenie dokładności skali do pomiaru wzrostu, ponieważ oznaczanie wzrostu człowieka jest zawsze obarczone bardzo dużą niedokładnością.

---

## 5 Rozpakowanie/montaż

---

### **Kontrola przy odbiorze**

Niezwłocznie po otrzymaniu paczki sprawdzić, czy nie posiada ona ewentualnych widocznych uszkodzeń zewnętrznych — to samo dotyczy skali do pomiaru wzrostu po jej rozpakowaniu.



### **Opakowanie/transport zwrotny**

Wszystkie części oryginalnego opakowania należy zachować na wypadek ewentualnego transportu zwrotnego. Do transportu zwrotnego należy używać tylko oryginalnego opakowania.

---


## 6 Pomiar wzrostu

---

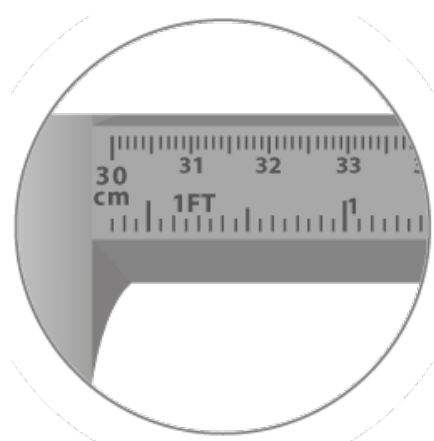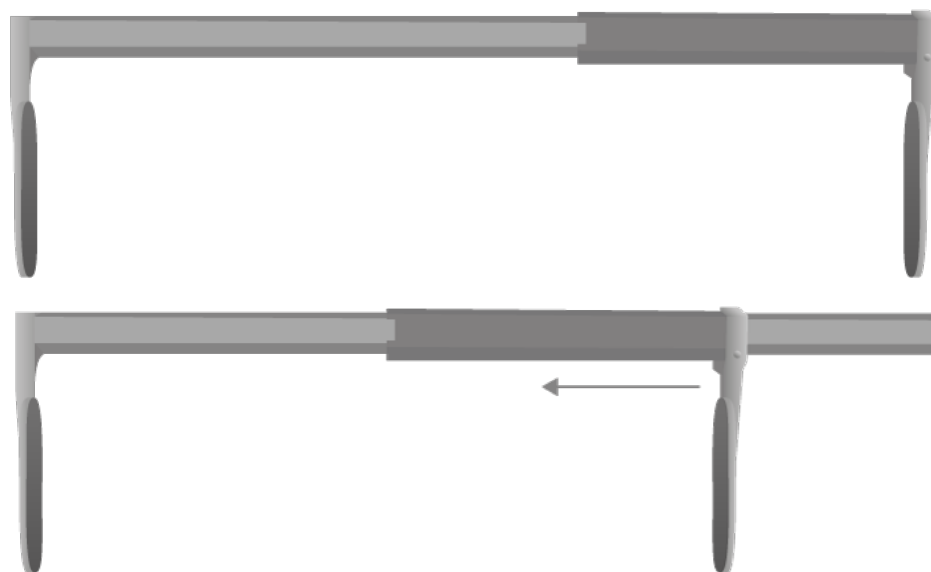


**Ogranicznik stały**

min. 30 cm

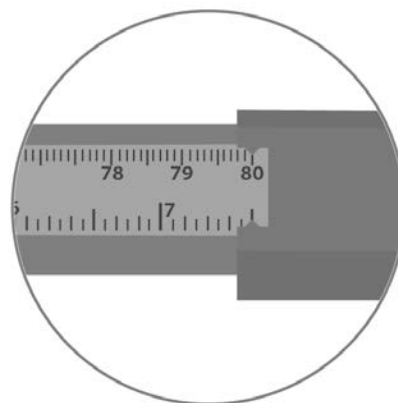

**Ogranicznik przesuwny**

maks. 80 cm

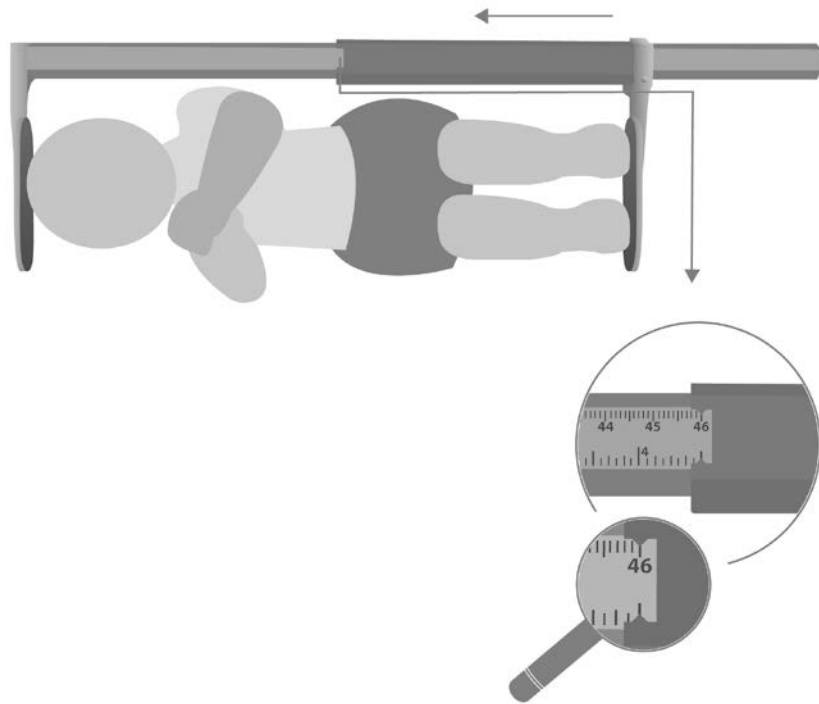

- ⇒ Ułożyć niemowlę w taki sposób, aby jego głowa leżała przy ograniczniku stałym.
- ⇒ Przesunąć suwak pomiarowy, opierając go o stopy, zgodnie z rysunkiem.
- ⇒ Odczytać wzrost.

---

## 7 Czyszczenie, konserwacja, utylizacja

---

<b>Czyszczenie</b>	Skalę do pomiaru wzrostu czyścić wyłącznie środkiem czyszczącym do użytku domowego lub dostępnym w handlu środkiem dezynfekcyjnym, np. 70% roztworem izopropanolu. Zalecamy używanie środka dezynfekcyjnego przeznaczonego do wykonywania dezynfekcji metodą wycierania powierzchni na mokro. Przestrzegać wskazówek producenta.
<b>Dezynfekcja</b>	
	Nie używać polerujących lub agresywnych środków czyszczących, jak spirytus, benzyna lub podobne, ponieważ mogą one uszkodzić wysokiej jakości powierzchnię.
<b>Sterylizacja</b>	Sterylizacja urządzenia jest niedozwolona.
<b>Utylizacja</b>	Utylizację opakowania i skali do pomiaru wzrostu należy przeprowadzić zgodnie z prawem, krajowym lub regionalnym, obowiązującym w miejscu eksploatacji urządzenia.