



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Telefone: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Manual de utilização

## Medidor de altura mecânico

### **KERN MBA-A01**


Versão 1.0

2018-08

P



**MBA-A01-BA-p-1810**

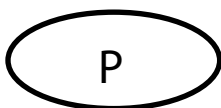

# KERN MBA-A01

Versão 1.0 2018-08

## Manual de utilização Medidor de altura mecânico

### 1 Características técnicas

KERN (tipo)	TMBA-A01-A
Modelo	MBA-A01
Faixa de medição	30–80 cm
Divisão	1 mm
Tolerância	5 mm
Dimensões (L x A x P) mm	850 x 240 x 60 mm
Peso líquido	cerca de 800 g

### 2 Declaração de conformidade

A declaração atual de conformidade WE/UE está disponível online no site:

[www.kern-sohn.com/ce](http://www.kern-sohn.com/ce)

---

### 3 Visão geral do dispositivo

---



1. Escala
2. Apoio de cabeça
3. Calibre deslizante/apoio para os pés

---

## 4 Indicações básicas (informações gerais)

---



⇒ Antes de pôr o dispositivo em funcionamento, leia com atenção o presente manual de utilização, mesmo quando já tenha experiência com balanças da empresa KERN.



### **Indicações de segurança**

- Segue o manual de utilização.
- Utilize apenas materiais de montagem fornecidos com o medidor.
- Deslizando o calibre da escala tenha cuidado para que a pessoa que está a ser medida não fique lesionada.
- A medição de altura fornece valores de confiança apenas quando os calcanhares, costas e cabeça estão retos, no entanto, não se esqueça que ao longo do dia a altura de pessoa pode variar alguns centímetros.

### **Supervisão das medidas de controlo**

- É aconselhável a verificação da precisão da escala para medir altura porque a determinação da altura humana é sempre repleta de imprecisões.

---

## 5 Desembalagem/montagem

---

### **Controlo na receção**

Imediatamente após a receção verifique se a encomenda não contém eventuais danos exteriores - o mesmo se aplica ao medidor de altura depois de desempacotado.



### **Embalagem/transporte de regresso**

Todas as partes da embalagem original devem ser guardadas para o caso de um eventual transporte de regresso. Para o transporte de regresso use apenas a embalagem original.


---

## 6 Medição de altura


---

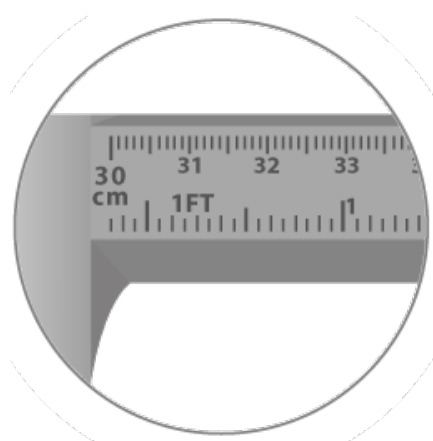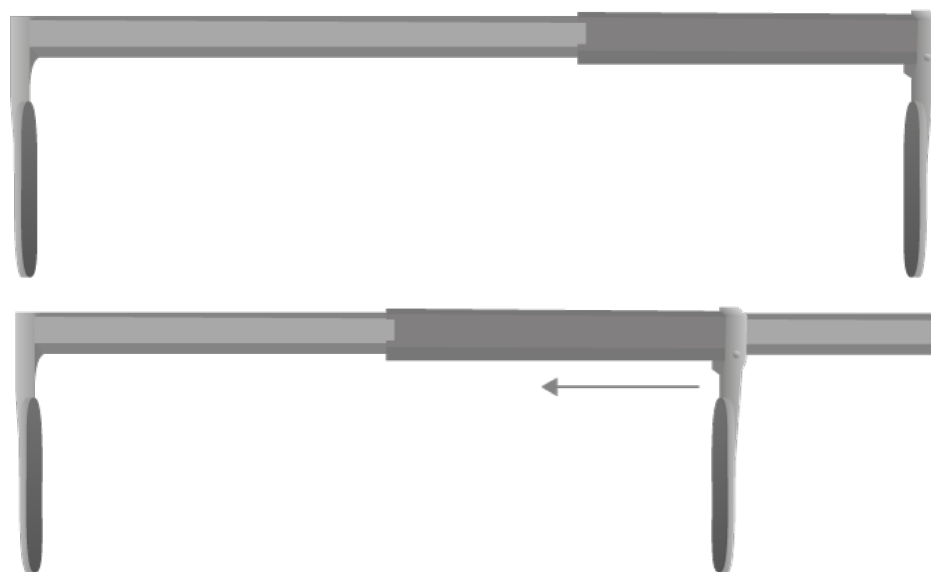

**Batente fixo**  
min. 30 cm

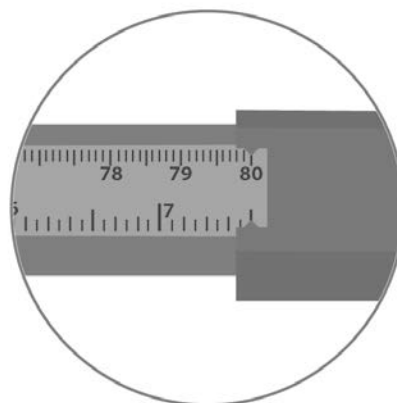

**Batente deslizante**  
max. 80 cm

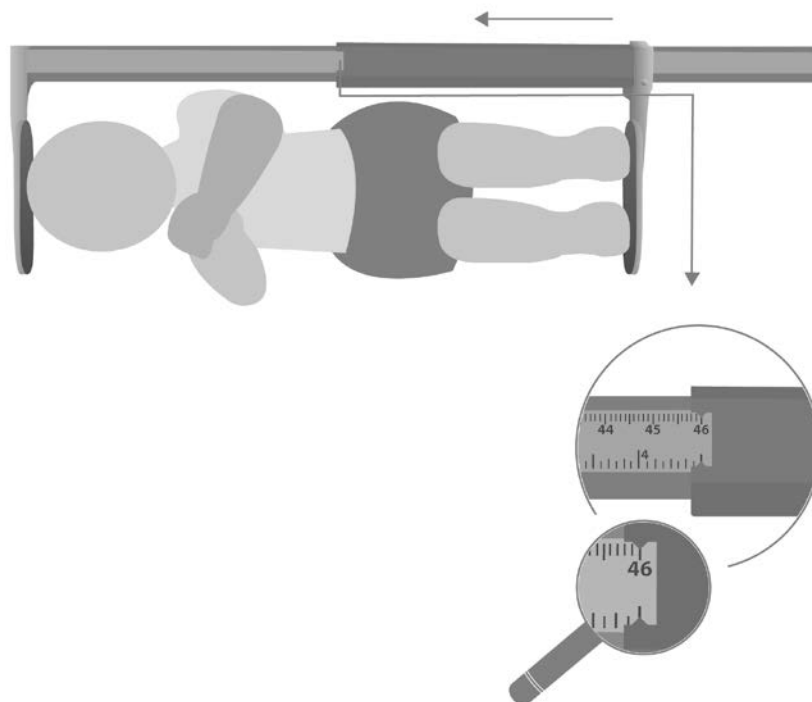

- ⇒ Coloque o bebé de maneira para que a sua cabeça fique próxima do batente fixo.
- ⇒ Deslize o calibre deslizante até tocar os pés, conforme demonstrado na figura.
- ⇒ Leia o valor da altura.

---

## 7 Limpeza, conservação, descarte

---

**Limpeza**  
**Desinfecção**

Limpe o medidor de altura usando exclusivamente detergente para uso doméstico ou um de desinfecção que esteja disponível no mercado, p.ex. solução de isopropanol a 70%. Recomendamos usar um desinfetante destinado para proceder à desinfecção esfregando a superfície a húmido. Seguir as indicações do fabricante.

Não usar produtos de limpeza de polir ou agressivos, tais como, álcool etílico, gasolina ou similares porque podem danificar a superfície, sendo esta de alta qualidade.

**Esterilização**

É proibida a esterilização do dispositivo.

**Descarte**

O descarte da embalagem e do medidor de altura devem ser efetuados em conformidade com a lei, nacional ou regional, em vigor no local de uso do dispositivo.